




Stručný návod pro Implantmed SI-1010 / SI-1015 / SI-1023


Uvedení do provozu – všeobecně

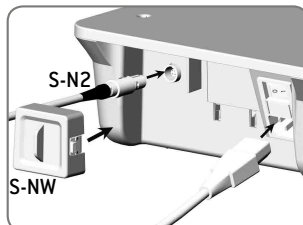


Připojte síťový kabel a
nožní ovládání.




Připojte kabel motoru.

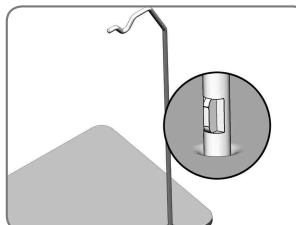


Připojte stativ.

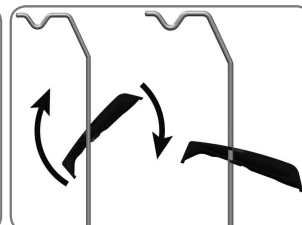

Zavěste a upevněte
univerzální odkládací
plochu.

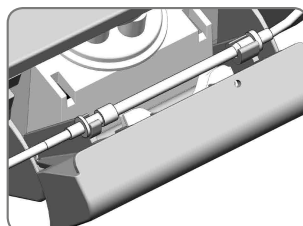


Otevřete kryt čerpadla.
Vložte sprejovou hadici.

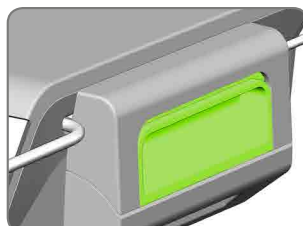

Uzavřete kryt čerpadla.




Zapojte síťový kabel do
zásuvky s ochranným
kontaktem.

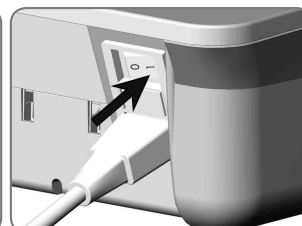

Zapněte řídicí jednotku
síťovým vypínačem.

Obsluha řídicí jednotky – hlavní nabídka

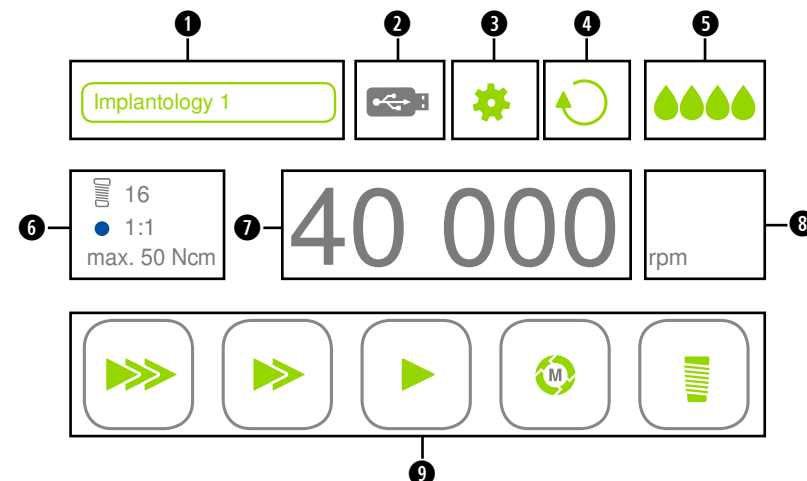

1	Moje oblíbené položky	6	Nastavit program
2	Dokumentace [DOKU]	7	Nastavit počet otáček/točivý moment
3	Nastavení	8	Režim postupu práce
4	Chod doprava/doleva	9	Program 1 až 5
5	Nastavit objem chladicího média		

Hygiena a péče – motor s kabelem

1 Prvotní dezinfekce

- > Při silném znečištění předčistěte pomocí dezinfekčních kapesníků.

2 Motor s kabelem



- Kabel motoru nestáčejte a nelamte!
Nestáčejte jej s malým poloměrem!

3 Ruční čištění

- > Opláchněte a okartáčujte demineralizovanou vodou (< 38 °C)

4 Strojové čištění a dezinfekce

- > Pro přípravu používejte výhradně termodezinfektory s programem sušení.



5 Sterilizace



- Společnost W&H doporučuje sterilizaci v souladu s normou EN 13060, třídy B. Jiné sterilizační postupy mohou snížit životnost motoru.



6 Skladování

- > Po sterilizaci uchovávejte na bezprašném a suchém místě.

Stručný návod pro Implantmed SI-1010 / SI-1015 / SI-1023

Ikony – navigace		Ikony – informace		Ikony – hlavní nabídka		Ikony – nastavení	
	Přidat uživatele		Nožní ovládání S-N2		Převodový poměr		Doba do zhasnutí
	Přidat protokol vrtání	Ikony – hlavní nabídka		rpm	Počet otáček		Zvuk
	Zpět		Dokumentace (DOKU)	Ncm	Točivý moment		Informace o přístroji
	Potvrdit/uložit		Nová pozice	Ikony – nastavení			Servis
	Editovat		Nová doku		Zámek obrazovky		Licence
	Nápověda		Ukončit doku		Uživatel		Informace o modulu
	Přejít na další stranu		Stupnice		Systém		Uživatelské rozhraní
	Snížit/zvýšit		Procenta		Křivka točivého momentu		Ovládání motoru
Ikony – informace		100	Total		Editovat uživatele		Nožní ovládání
	Nastavení zvoleno		Skupina protokolů vrtání		Nožní ovládání		Osstell
	Zvolena oblíbená položka		Protokol vrtání		Párování (Pairing)		Aktualizace softwaru
	Informace		Editovat		Variabilní	R	Tovární nastavení
	Informace s možností výběru		Kopírovat		ZAP/VYP		Nové spuštění
	Chybové hlášení, nelze pokračovat v práci		Přejmenovat		Kontrola systému		Jazyk
	Chybové hlášení, lze pokračovat v práci		Aktivovat		Nastavit zámek obrazovky		Zubní schéma
	Červená = vyměnit baterie		Smazat		Interval	I-IV	FDI
	Nožní ovládání S-NW		Oblíbený		LED	1-32	UNS

