



Hygienická údržba a péče

čisté
uvnitř,
čisté
zvenku

NOVÝ



assistina 3X3

Assistina 3x3: dokonalé čištění z vnitřní a vnější strany

assistina 3x3

Přehled výhod

- > Automatické vnitřní čištění
- > Automatické vnější čištění
- > Dokonalé mazání nástrojů
- > Krátká doba cyklu
- > Jednoduchá obsluha
- > Optimální poměr cena/výkon

Celkový proces*

1. Vnitřní čištění sprejovacích kanálků a součástí hnacího mechanismu, vnější čištění nástroje



2. Profouknutí sprejovacích kanálků a součástí hnacího mechanismu stlačeným vzduchem



3. Promazání součástí hnacího mechanismu servisním olejem W&H Service Oil F1



Assistina 3x3
3 nástroje x 3 kroky přípravy:
vnitřní čištění, vnější čištění, promazání

Nikdy nečistěte nástroje ručně

Od této chvíle se můžete soustředit na to, co je opravdu důležité: na své pacienty. Důvodem je skutečnost, že časově náročnou přípravu např. násadců, kolénkových násadců a turbín ke sterilizaci provádí přístroj Assistina 3x3 automaticky.



Vnitřní čištění

Důkladné čištění všech součástí hnacího mechanismu a sprejovacích kanálků zajišťuje plnou funkčnost nástrojů.



Vnější čištění

Odstraňováním organických usazenin před sterilizací se zajišťuje bezpečnost vašich pacientů a spolupracovníků v ordinaci.



Dokonalé mazání

Díky přesnému automatickému mazání všech dílů hnacího mechanismu se prodlužuje doba životnosti vašich nástrojů.



Rekordní čas

Díky krátké době cyklu v délce přibližně šesti minut můžete zkrátit celkovou běžnou dobu přípravy svých nástrojů.



Jednoduchá obsluha

Přístroj Assistina 3x3 nabízí velmi jednoduchou obsluhu; příprava probíhá stisknutím tlačítka. Není nutné žádné školení.



Poměr cena/výkon

Nejvyšší možný stupeň účinnosti čištění při nízkých pořizovacích nákladech a maximálně úsporné spotřebě.

Assistina 3x2: dokonalé vnitřní čištění

assistina 3x2

Přehled výhod

- > Automatické vnitřní čištění
- > Dokonalé mazání nástrojů
- > Krátká doba cyklu
- > Jednoduchá obsluha
- > Optimální poměr cena/výkon



Assistina 3x2
3 nástroje x 2 kroky přípravy:
vnitřní čištění, promazání

Probudte obrázek k životu:
tady a teď

Technologie Augmented Reality (AR)
společnosti W&H spojuje reálný svět
se světem virtuálním – jedinečný
zážitek. Budoucnost začíná dnes!



Obrázek umí více, než by se zdálo:
Lze ho probudit k životu!

Stáhněte si pro svůj chytrý telefon
či tablet zdarma aplikaci »W&H AR«
z Google Play (pro systém Android)
nebo z Apple App Store. Otevřete aplikaci
a podržte svůj přístroj ve vzdálenosti
50 cm nad obrázkem!

Technické údaje



Naskenujte kód QR pomocí mobilního telefonu a zjistíte více o přístroji Assistina

Obr. fotografie symbolů. Doplnkové vybavení a obsah vyobrazených dílů příslušenství nejsou součástí dodávky.



Přístroj Assistina	3x3	3x2
Proces:	Vnitřní a vnější čištění, promazání	Vnitřní čištění, promazání
Vhodné pro:	Násadce a kolénkové násadce, turbínky, vzduchové motorky a vzduchem poháněné nástroje pro odstraňování zubního kamene	
Síťové napětí:	100 – 240 V	
Max. příkon:	40 VA	
Spotřeba vzduchu:	cca 100 NI/min.	cca 60 NI/min.
Provozní tlak:	5–10 bar (regulace vestavěným automatickým regulátorem tlaku)	
Výška / šířka / hloubka:	358 x 207 x 397 mm	
Objem náplně:	1 000 ml aktivní kapaliny W&H Activefluid, MC-1100, 200 ml servisního oleje W&H Service Oil F1, MD-200	

Přesné údaje k různým adaptérům Assistina 3x3 / 3x2 naleznete na webu wh.com



Ověřeno znaleckým posudkem

Ověření procesu je potvrzeno posudkem, do něhož lze nahlédnout na webu wh.com.



Servisní olej W&H Service Oil F1

Optimálním promazáváním dílů hnacího mechanismu se prodlužuje životnost jemných nástrojů v zubních ordinacích.



Aktivní kapalina W&H Activefluid

Čisticí roztok určený k důkladnému vnitřnímu a vnějšímu čištění nástrojů.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com