

Po každém pacientovi

Povrch zubní soupravy

1 Otřete dezinfekčním prostředkem Dürr FD 333/FD 322 nebo podobným:


- opěrku hlavy
- opěrku ruky
- ochranný kryt operačního světla
- madlo operačního světla (anebo vyměňte, vysterylizujte v autoklávu nebo vyčistěte v termodezinfektoru)
- hygienickou membránu (anebo ji vyměňte, vysterylizujte v autoklávu nebo vyčistěte v termodezinfektoru)
- hadice k nástrojům (nesterilizujte v autoklávu!)
- nástroje, viz pokyny k nástrojům
- plivátko, panel nástrojů a povrchy ramena.

NEPOUŽÍVEJTE SPREJ!

2 Otřete čalounění jemným mýdlem rozpuštěným ve vodě. V případě potřeby dezinfikujte přípravkem Dürr FD 312.

3 Vyčistěte plivátko:

- Nalijte do něj několik kapek přípravku Orotol Plus a měkkým kartáčkem vyčistěte.
- Plivátko opláchněte stiskem tlačítka pro oplach.
- Vnější povrch plivátka lze otřít dočista anebo vydezinfikovat kusem látky.

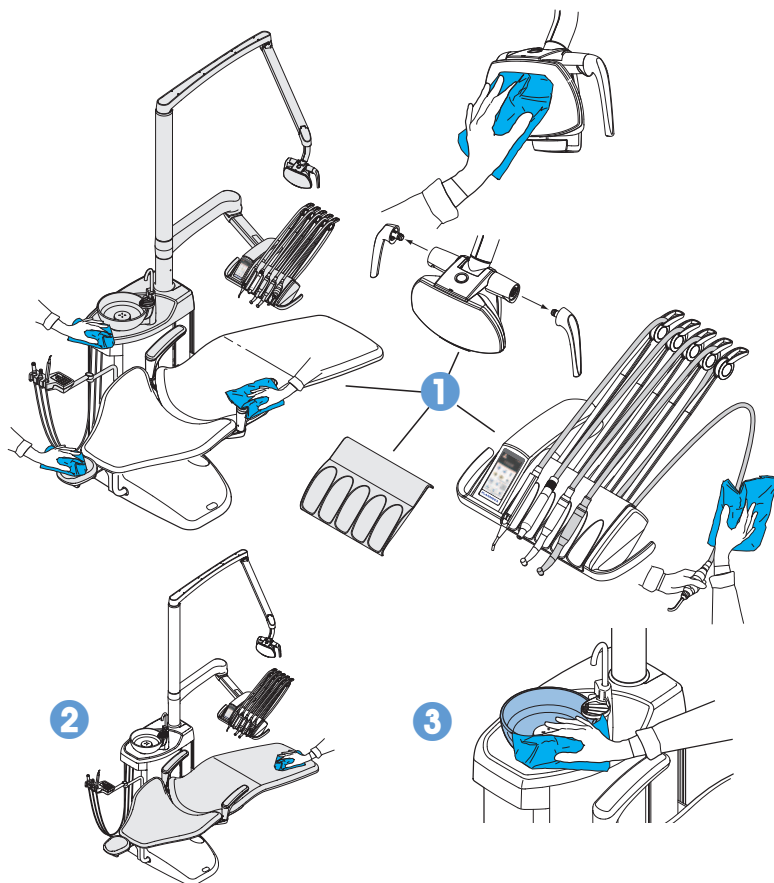**Odsávací systém**


1 Odstraňte použité odsávací koncovky.

2 Propláchněte odsávací hadice odsátím jedné sklenice vody každou z nich.

3 Vyčistěte sací násadce a otřete je přípravkem Dürr FD 333/FD 322 anebo vysterylizujte v autoklávu.


4 Omyjte anebo vydezinfikujte držáky odsávačky přípravkem Dürr FD 333/FD 322.

NEPOUŽÍVEJTE SPREJ!

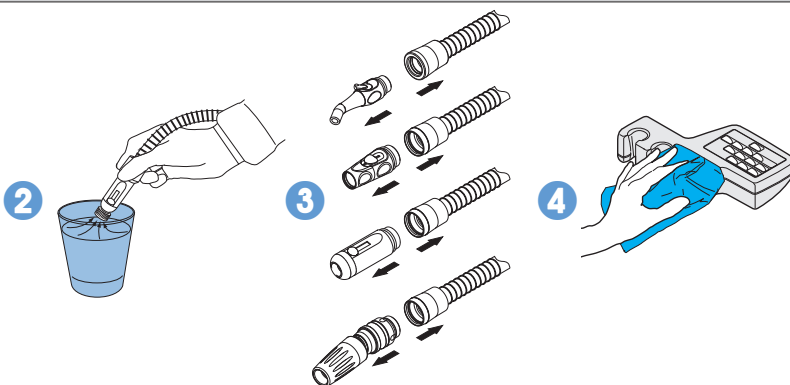**Vodní rozvod soupravy**



1 Vložte nástroje do proplachovacího držáku.

2 Proplachování zahajte ohnutím volných ramen nejméně o 90 °; zvolte krátký proplach.

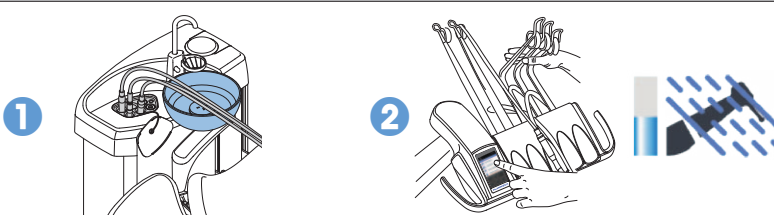


Odsávací systém

- 1 Propláchněte odsávací hadice odsátím 0,5 l vody každou z nich.
- 2 Otřete sací násadce přípravkem Dürr FD 333/FD 322.

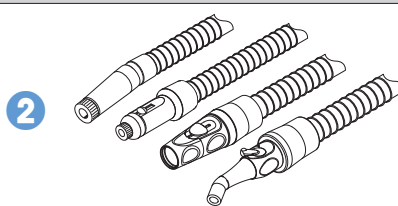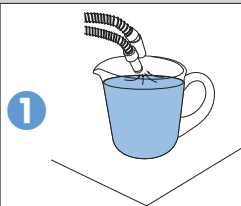



Filtry

Filtry hrubých nečistot čistěte denně.

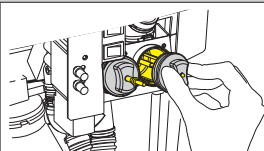

Vodní rozvod soupravy

- 1 Vložte nástroje do proplachovacího držáku.
- 2 Proplachování zahajte ohnutím volných ramen nejméně o 90 °; zvolte dlouhý proplach.

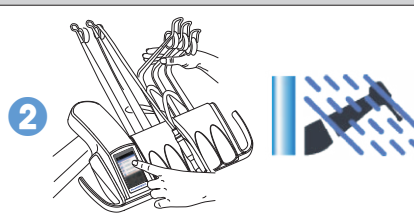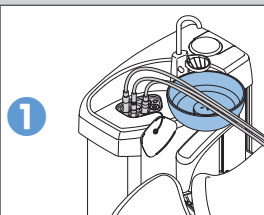



Po pracovním dnu

Povrch zubní soupravy

Vydezinfikujte čalounění přípravkem Dürr FD 312.



Odsávací systém

- 1 Zvolte systém STCS.
- 2 Vložte sací hadice do držáku STCS.
- 3 Dávkovací nádobku naplňte přípravkem Orotol Plus.
- 4 Stiskněte zelené spouštěcí tlačítko.
- 5 Sací násadce vysterylizujte v autoklávu.

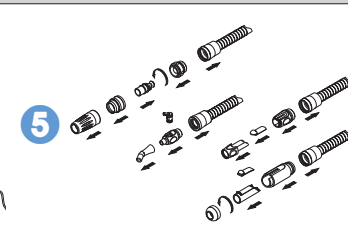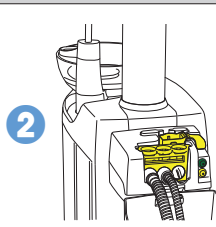


Anebo

- 1 20 ml přípravku Orotol Plus smíchejte s 1 l vody v nádobce Orocup.
- 2 Roztok prožeňte odsávacími hadicemi. Po odsátí roztoku vraťte hadice okamžitě do držáku.
- 3 Sací násadce vysterylizujte v autoklávu.

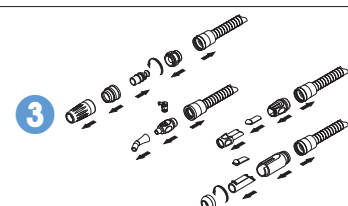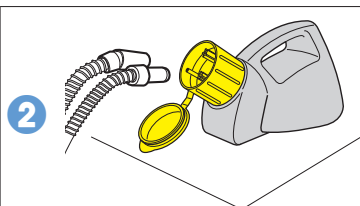




Filtry

- 1 Filtr plivátka denně vyprázdněte, čistěte a dezinfikujte, a vyměňte pokud to bude potřebné.
Pozor! Nevyklepávejte filtr plivátka do výlevky.
- 2 Plivátko otřete dočista anebo omyjte vodou o teplotě max. 65 °C.

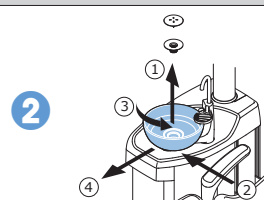


Vodní rozvod soupravy

- 1 Vložte nástroje do proplachovacího držáku.
- 2 Proplachování zahajte ohnutím volných ramen nejméně o 90 °; zvolte dlouhý proplach.
- 3 Po přeplachu ihned soupravu vypněte.

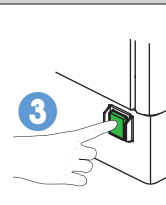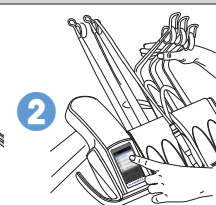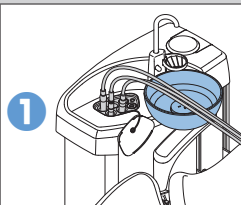

Povrch zubní soupravy

- 1 Vyčistěte a ošetřete čalounění přípravkem Dürr FD 360.
- 2 Očistěte nožní spínač.
- 3 Vyčistěte kryt operačního světla.

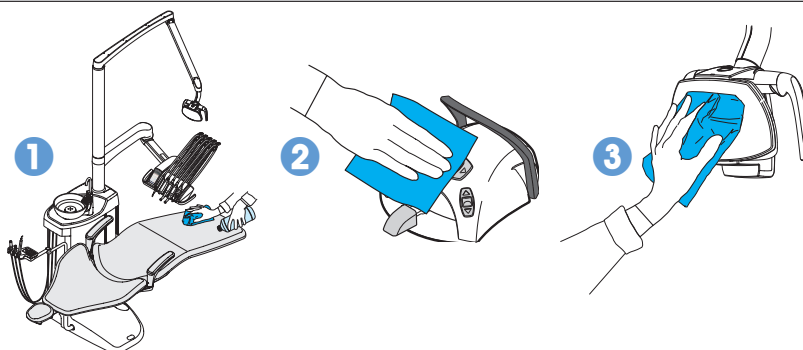

Odsávací systém

- 1 20 ml přípravku Orotol Plus smíchejte s 1 l vody.
- 2 Stiskněte programovací tlačítko na dobu asi 5 s. Otevře se ventil plivátka. Pozor, platí pouze pro separátory amalgámu Dürr nebo systémy VS/A.
- 3 Nalijte směs do plivátka.
- 4 Nechte roztok přes noc působit. Ráno odsávací systém propláchněte 2 l vody a vypláchněte plivátko.




Filtry

Vyprázdněte filtr odsávacího systému podle pokynů výrobce, anebo pokud se zaplní.

Vodní rozvod soupravy


- 1 Vložte nástroje do proplachovacího držáku.
- 2 Ohněte ramena nejméně o 90 ° a spusťte čištění vodního rozvodu (WCS).
- 3 Vypněte hlavní přívod vody. Připojte naplněný kontejner k soupravě. Postupujte podle pokynů na displeji.
- 4 Druhý den ráno soupravu zapněte.
- 5 Naplňte nádobu čistou vodou a postupujte podle pokynů na displeji.

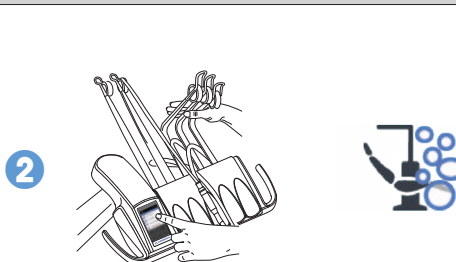


Povrch zubní soupravy

- 1 Vyčistěte ramena nástrojů.
- 2 Proplachovací držák vyčistěte v termodezinfektoru anebo vysterilizujte v autoklávu.

1

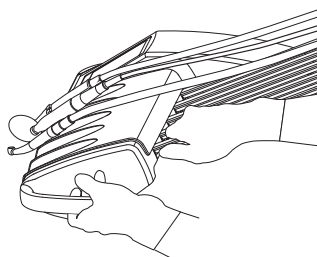


2

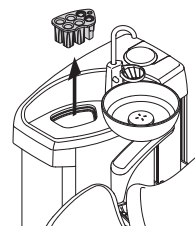

Odsávací systém


Separátor vyprázdněte, když je na 70 % plný (pouze Microvac a mokré systémy (WET)).

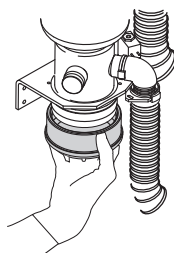


Filtry

- 1 Vyměňte filtry hrubých nečistot.
- 2 Zkontrolujte separátor amalgámu. Vyměňte, když je plný na 95 % (objeví se hlášení HE 01).
- 3 Vyprázdněte sběrnou nádobku oleje a vyčistěte ji.


1

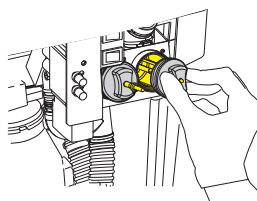

2

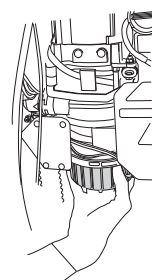

3

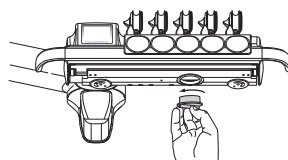

Anebo

