

Po každém pacientovi

Povrchy

1 Otřete pomocí dezinfekčního prostředku na povrchy schváleného společností Planmeca:

- kovové části opěrky hlavy
- kovové části opěrek rukou
- ochranný kryt operačního světla
- madla operačního světla
- hygienickou membránu
- hadice k nástrojům
- nástroje (viz pokyny k nástrojům)
- držák nástrojů*
- ramena nástrojů
- stůl
- horní kryt plivátka


Otřete zrcátko pacienta na operačním světle jemným mýdlem rozpuštěným ve vodě.

2 Otřete čalounění jemným mýdlem rozpuštěným ve vodě. V případě potřeby otřete pomocí dezinfekčního prostředku na čalounění schváleného společností Planmeca.

3 Otřete monitor a madlo (viz pokyny k monitoru).

4 Vyčistěte plivátko:

- Nalijte do něj několik kapek dezinfekčního prostředku schváleného společností Planmeca a měkkým kartáčkem vyčistěte.
- Plivátko opláchněte stisknutím tlačítka pro oplach.
- Otřete vnější povrch plivátka.

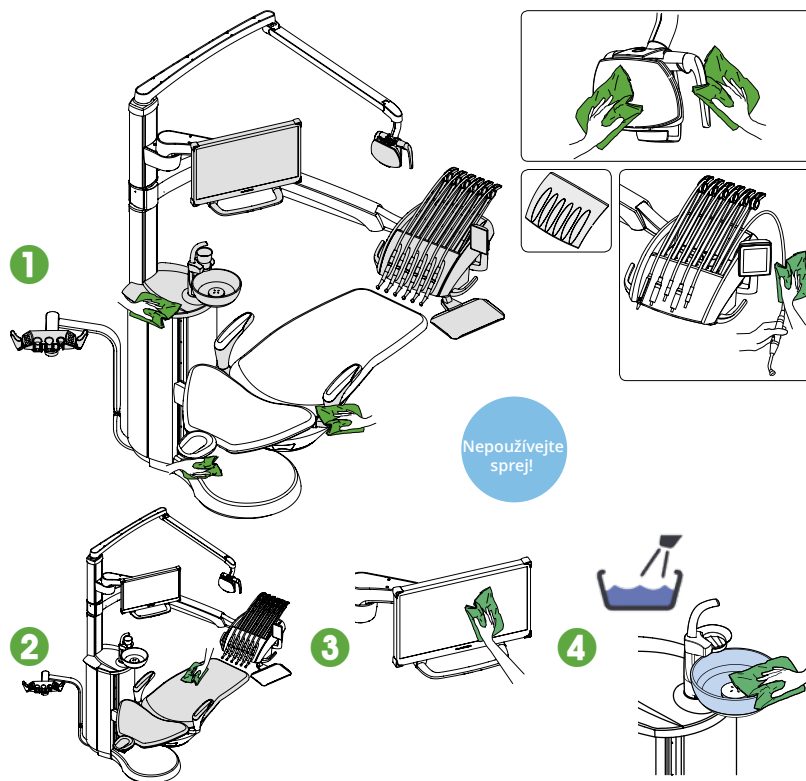

*Před čištěním držáku nástrojů uzamkněte dotykový displej.



Dotykový displej je odemknutý. Stisknutím ho zamknete.



Dotykový displej je zamknutý. Stisknutím a přidržením ho odemknete.

Odsávací systém

1 Odstraňte použité odsávací koncovky.

2 Propláchněte odsávací hadice odsátím jedné sklenice vody každou z nich.

3 Otřete sací násadce pomocí dezinfekčního prostředku na povrchy schváleného společností Planmeca.

4 Otřete držák Flexy™ pomocí dezinfekčního prostředku na povrchy schváleného společností Planmeca.




Vodní rozvod

Krátký proplach

1 Vložte všechny nástroje využívající vodu do proplachovacího držáku.


2 Ohněte ramena nástrojů v úhlu nejméně o 90° a spusťte krátký proplach.

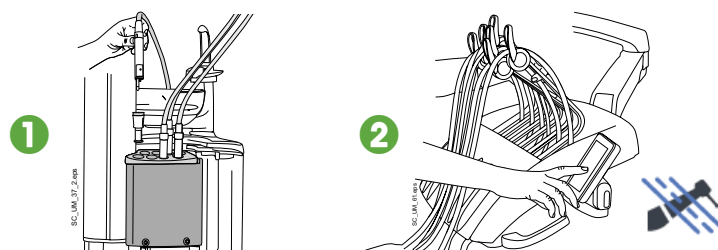

Odsávací systém


Proplach savek

- 1 Spusťte proplach savek.
- 2 Otrete sací násadce pomocí dezinfekčního prostředku na povrchy schváleného společností Planmeca.

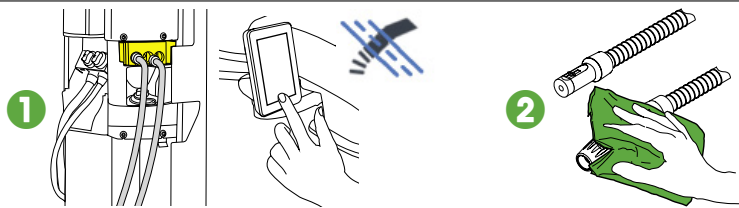

Filtry


Vyčistíte filtry hrubých nečistot.

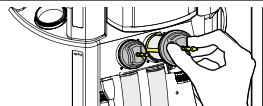

Vodní rozvod

Dlouhý proplach

- 1 Vložte všechny nástroje využívající vodu do proplachovacího držáku.
- 2 Ohněte ramena nástrojů v úhlu nejméně o 90° a spusťte dlouhý proplach.

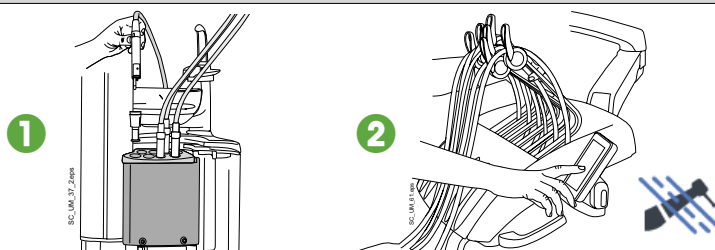

Po skončení pracovního dne


Povrchy

Otrete čalounění pomocí dezinfekčního prostředku na čalounění schváleného společností Planmeca.

Odsávací systém

Čištění savek

- 1 Zasuňte sací hadičky do držáku pro čištění sacích hadiček.
- 2 Spusťte čištění savek.
- 3 Vydezinfikujte sací násadce v mycím dezinfektoru.
- 4 Držák Flexy™: Vydezinfikujte jednotlivé držáky v mycím dezinfektoru. Otrete držák ústního skeneru pomocí dezinfekčního prostředku na povrchy schváleného společností Planmeca.

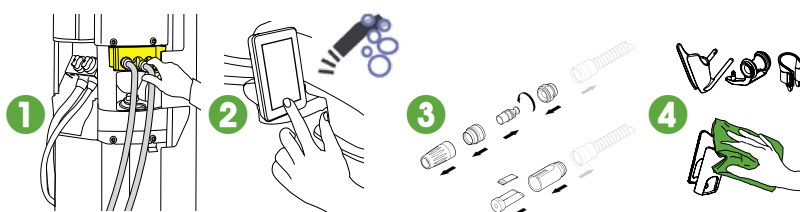

Filtry


- 1 Filtr plivátka vyprázdněte, vyčistěte a vydezinfikujte v mycím dezinfektoru.
Pozor! Nevyklepávejte filtr plivátka do výlevky.
- 2 Vyjměte plivátko a omyjte ho vodou o teplotě max. 65 °C.



Vodní rozvod


Dlouhý proplach

- 1 Vložte všechny nástroje využívající vodu do proplachovacího držáku.
- 2 Ohněte ramena nástrojů v úhlu nejméně o 90° a spusťte dlouhý proplach.

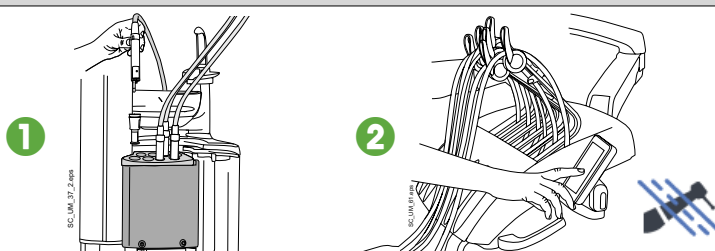


Povrchy

Otřete čalounění pomocí čistícího prostředku na čalounění schváleného společností Planmeca.

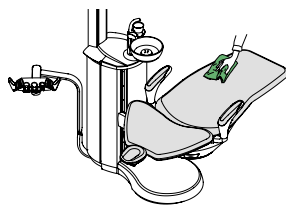

Odsávací systém



- 1 Smíchejte 20 ml dezinfekčního prostředku schváleného společností Planmeca s 1 l vody.
- 2 Stiskněte tlačítko VS/A. Otevře se ventil plivátka. *Pozor, platí pouze pro separátory amalgámu Dürer nebo systémy VS/A.*
- 3 Nalijte směs do plivátka.
- 4 Nechte roztok přes noc působit.

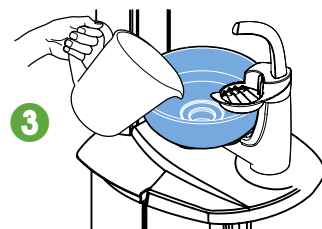

Vodní rozvod, pokud je vypnuté trvalé čištění


Čištění WCS

- 1 Vložte všechny nástroje využívající vodu do proplachovacího držáku.
- 2 Ohněte ramena nástrojů v úhlu nejméně o 90° a spusťte čištění rozvodu vody.
- 3 Soupravu na noc vypněte.
- 4 Zapněte jednotku a počkejte na dokončení cyklu čištění.
- 5 Zkontrolujte, zda je koncentrace peroxidu vodíku ve vodě < 250 ppm. Pokud tomu tak není, proveďte dlouhé propláchnutí a zopakujte test.

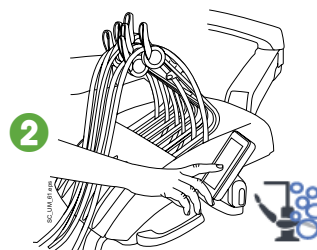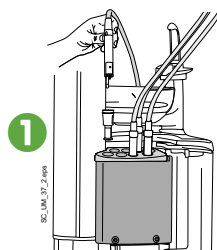


Odsávací systém a rozvod vody

- 1 Vydezinfikujte držák pro čištění sacích hadiček v mycím dezinfektoru.
- 2 Proplachovací držák vydezinfikujte v mycím dezinfektoru. V případě potřeby vysterylizujte v autoklávu.
- 3 Vyndejte nádobku na vodu a vyčistěte ji.

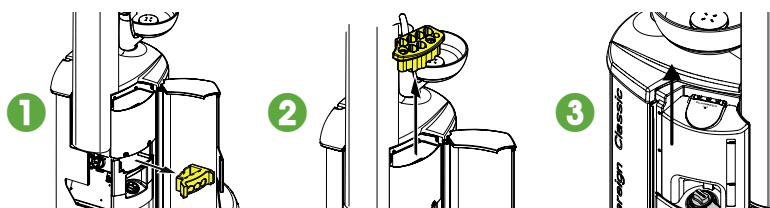

Filtry


- 1 Vyměňte filtry hrubých nečistot.
- 2 Vyprázdněte filtr jemných nečistot VS/A.
- 3 Vyprázdněte sběrnou nádobu na olej.

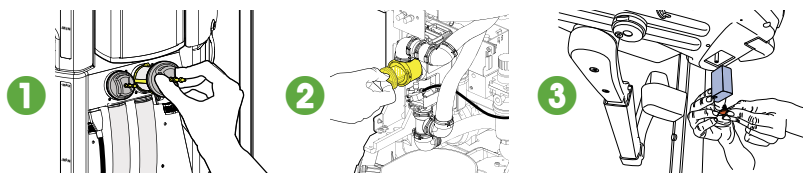

Vodní rozvod, pokud je zapnuté trvalé čištění

Čištění WCS


- 1 Vložte všechny nástroje využívající vodu do proplachovacího držáku.
- 2 Ohněte ramena nástrojů v úhlu nejméně o 90° a spusťte čištění rozvodu vody.
- 3 Soupravu na noc vypněte.
- 4 Zapněte jednotku a počkejte na dokončení cyklu čištění.
- 5 Zkontrolujte, zda je koncentrace peroxidu vodíku ve vodě < 250 ppm. Pokud tomu tak není, proveďte dlouhé propláchnutí a zopakujte test.

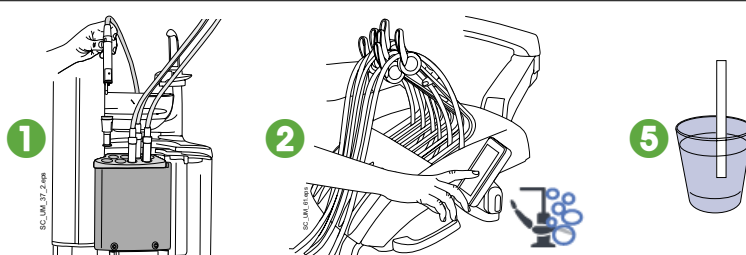

Zásobníky


Zásobník dezinfekčního prostředku

Doplňte, když bliká žlutá ikona v horní části ovládacího panelu. Interval doplnění je přibližně čtyři týdny.

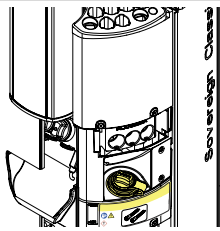


Zásobník Planmeca PlanClear™

Doplňte, když bliká zelená ikona v horní části ovládacího panelu. Interval doplnění je přibližně čtyři týdny.

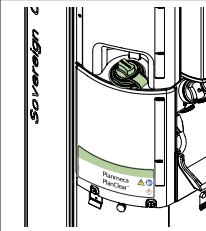

Nádobka na vodu

Doplňte, když bliká modrá ikona v horní části ovládacího panelu.

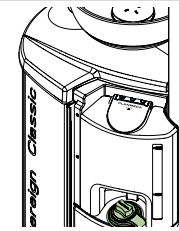

Dezinfekční prostředky schválené společností Planmeca

Dezinfekční prostředky na povrchy*	Dezinfekční prostředky na čalounění	Čistící prostředky na čalounění	Dezinfekční prostředky pro odsávací systém*	Dezinfekční prostředky pro vodu a rozvod vody
Dürr FD 322	Dürr FD 312	Dürr FD 360	Dürr Orotol Plus	Planmeca PlanClear™
Dürr FD 333			Orbis Evacuation System Disinfection Concentrate (193087, 193088)	
Orbis surface disinfection (MD121936, MD121937, MD125294, MD125295)				

*Pečlivě zkontrolujte požadavky na čisticí a dezinfekční prostředky zařízení třetích stran, abyste zajistili, že použití prostředků nebude mít nepříznivý vliv na platnou záruku nebo jiné smluvní podmínky výrobců zařízení třetích stran.